

Vivid[™] S60 – Vivid[™] S70 Tips & Tricks

Gestion de disque



Vivid[™] S60 – Vivid[™] S70

Tips & Tricks

Gestion de disque

Versions logicielles 202 et 203 Rév. 01 Février 2020

DOC2369882

© 2019 General Electric Company - Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et caractéristiques décrites dans le présent document ou d'interrompre le produit décrit à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. Veuillez visiter

www.gehealthcare.com/promotional-locations. GE, le monogramme GE, imagination at work, Vivid et EchoPac sont des marques commerciales de General Electric Company ou de l'une de ses filiales. GE Healthcare, une division de General Electric Company. Les marques commerciales de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. GE Medical Systems Diagnostics Ultrasons et soins primaires, LLC, une société du groupe General Electric, exerçant ses activités sous le nom de GE Healthcare



PRINCIPE DE LA GESTION DU DISQUE4		
►	Pour quoi faire ?	4
►	Recommandations	4
►	Mise en garde	4

LES DIFFÉRENTS SCENARII		
►	Déplacer les images)
►	Copier les images)
►	Effacer les images	5

CONFIGURATION DE LA GESTION DU DISQUE6			
	►	Accéder au menu de configuration	6
	►	Configuration	7
EXÉCU	JTION E	DE LA GESTION DU DISQUE	8
SAUVI	EGARD	E DE LA BASE DE DONNÉES PATIENTS	9
RESTA	URATI	ON DE LA BASE DE DONNÉES PATIENTS 1	1



Principe de la Gestion du Disque

Pour quoi faire ?

La Gestion du Disque permet à l'utilisateur de gérer l'espace disque dur tout en gardant la base de données des patients sur le système.

Elle permet de déplacer, copier ou effacer des images des dossiers patients les plus anciens.

Elle intègre une fonction de purge automatique (en configuration copie des images) qui effacera automatiquement les images et les rapports qui ont déjà été copiés au fur et à mesure que le disque dur se remplit.

Recommandations

Vérifiez que vous avez défini un protocole de gestion des données pour votre bureau/établissement. L'utilisateur DOIT gérer le média extractible utilisé pendant la Gestion de Disque, en tenant un journal et en créant un système d'organisation des médias.

Mise en garde

N'utilisez pas le disque dur interne du Vivid S60-S70 pour le stockage d'images à long terme. Un support de stockage externe ou une solution serveur réseau est recommandé pour l'archivage d'images à long terme.

Il est toujours fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde du support, ceci relevant de la responsabilité du client.



Les différents scenarii

La gestion de disque est configurée pour :

Déplacer les images

L'utilisateur exécute la gestion de disque régulièrement pour déplacer les images des examens les plus anciens vers un média amovible (disque dur externe ou NAS) ou un volume sur le réseau.

Les images sont alors effacées du Vivid S60-S70. Le dossier patient (intégrant mesures et commentaires) reste sur le Vivid S60-S70.

Un tel scénario évite la saturation du disque dur et garde les images des examens les plus récents sur le Vivid S60-S70.

Remarque :

Pour accéder aux images une fois déplacées, il suffit de connecter le média au Vivid S60-S70 puis d'ouvrir le dossier patient comme à l'accoutumé.

Copier les images

L'utilisateur exécute la gestion de disque régulièrement pour copier les images des examens les plus anciens vers un média amovible (disque dur externe ou NAS) ou un volume sur le réseau.

En parallèle, pour éviter la saturation du disque dur du Vivid S60-S70, la fonction de purge automatique supprime automatiquement les images préalablement copiées lorsque l'espace disponible sur le disque dur du Vivid S60-S70 a atteint sa limite.

Un tel scénario permet au système de gérer automatiquement l'espace disque du système.

Effacer les images

L'utilisateur exécute la gestion de disque régulièrement pour effacer de façon définitive les images des examens les plus anciens.



GE Healthcare VividClub Configuration de la Gestion du Disque



Remarque préalable :

Si vous utilisez un disque dur externe pour effectuer la gestion de disque, il est recommandé de ne l'utiliser que pour cette seule utilisation.

Il ne peut en aucun cas être utilisé pour la sauvegarde de la base de données patients.

Il ne peut non plus être utilisé pour effectuer la gestion de disque d'un autre appareil.

Accéder au menu de configuration

La configuration du système de Gestion du Disque ne peut être effectuée que par un utilisateur disposant des droits d'administration.

Sur l'écran tactile, cliquer sur







Sur l'écran principal sélectionner alors :



Gestion du Disque



Configuration

Intervalle de rappel

Spécifie le nombre de jours/semaines après lequel le système invite à exécuter la gestion du disque.

Lorsque le délai est écoulé et jusqu'à la réalisation de la gestion du disque, un message de rappel s'affiche alors au démarrage du Vivid S60-S70.

Lorsque l'intervalle de rappel est programmé sur *Arrêt*, aucun rappel n'est effectué.

🛑 Traiter fichiers supérieurs à

Permet de choisir la limite de temps pour laquelle les images sont manipulées lors de la gestion de disque. *Exemples :*

• Traiter fichiers supérieurs à : 6 mois

Les images des examens de moins de 6 mois ne seront pas manipulées.

Les images des examens de plus de 6 mois seront déplacées, copiées ou effacées selon le scenario choisi.

• *Traiter fichiers supérieurs à : Aujourd'hui* Toutes les images sont manipulées

Fonctionnement

Permet de sélectionner le scenario

Déplacer

Déplace les images vers un support amovible ou une volume réseau

• Copier

Copie les images vers un support amovible ou une volume réseau

• Effacer

Efface définitivement les images

Vers

Permet de choisir entre 3 types de destinations différentes :

- CD/DVD
- USB/Disque dur
- Répertoire distant (pour un volume réseau ou un NAS préalablement paramétré)



Exécution de la gestion du disque



S'assurer que le média amovible ou le volume réseau est connecté.

Sur l'écran tactile, cliquer sur :



Fin d'examen

Pour finaliser l'examen en cours si nécessaire (fin d'examen)

Gestion du Disque

La fenêtre de gestion du disque s'ouvre. Elle résume la configuration définie.

Sur l'écran principal, cliquer sur :

Débuter

Le système scrute la base de données puis indique le nombre de total de fichiers et la taille du transfert. Puis la gestion de disque commence.

Remarque

À tout moment, la gestion de disque peut être interrompue en cliquant sur Abandon.

Le système finit alors de copier les images du patient en cours.

Une fois terminé, la fenêtre Rappel de sauvegarde apparait indiquant qu'il est nécessaire d'effectuer une sauvegarde de la base de données locale (archive Patient)



GE Healthcare VividClub Sauvegarde de la base de données patients



Pour minimiser la perte accidentelle de données, sauvegarder les archives patients (dossier patient, mesures et commentaires) stockées sur le disque dur local au moins **une fois par semaine**.

GE décline toute responsabilité en cas de perte de données si les procédures de sauvegarde proposées ne sont pas respectées et n'apportera pas son soutien à la récupération des données perdues.

Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administration ont accès à la fonction de sauvegarde/restauration.

Sur l'écran tactile, cliquer sur













Sur l'écran principal, cliquer sur :

	•	
ЛА	m	2
AU		

Sauvegarder

Cocher la case Archive Patient

Vers

Sélectionnez la destination :

• Disque Dur/Carte mémoire pour une clé USB

Ce média doit être différent de celui utilisé pour la gestion de disque.

Il ne doit pas non plus contenir une sauvegarde précédente de la base de données.

• Répertoire distant

Il s'agit d'un dossier partagé sur le réseau (ou le PC du client)

Pour pouvoir sélectionner un dossier partagé sur le réseau, le chemin (du type : \\nom-serveur\\nom-partage) doit être entré dans le **Répertoire distant**.

Démarrer Backup

Au cours de la sauvegarde, des fenêtres de progression affichent le déroulement de l'opération en cours.

A la fin du processus, la fenêtre **Backup terminé** s'affiche.





GE Healthcare VividClub Restauration de la base de données patients





Connecter le dispositif de sauvegarde.

Sur l'écran tactile, cliquer sur :



Utilitaire





	GE Healthcare Ultrasons	HR C.
_		
Sauvegarder Restaurer Utilisateurs Syste	ime Admin	
Données vers	Résultat	
Y Archive Patient		
Inchines Ressource Inchines Ressource Inchines Adv.Nillisatiour Perametres MAA.Nillisatiour Inchief Stress Configuration Cumethole Junzes Configuration Comechole Inchines destantions		
Restaurer à partir Dispositif Sour Dispositif Sour ORestaurer Usine Défaut Répertoire d	surce DD Interne (D/lexport/backup)	
	staurer Maintend	
agerie Mesure/Text Rapport	Réseau Système A propos	Admin Service
starte Metalent Mappel		and a second
Information		
(i) contenu ju modif. réa	isqu'à 14-Feb-2019 14-1: lisées après ce point ser Voulez-vous continuer ?	2. Toutes les ont perdues.
	1 iu	Non
		ton
Information		
1	Succès	
		k
		0k

Sur l'écran principal, cliquer sur :

Admin



Cocher le bouton **Restaurer à partir du dispositif source**

 Sélectionner le dispositif à l'aide du menu déroulant

• Cliquer sur **Restaurer Maintenant**

Un message d'information spécifiant la date de la sauvegarde récupérée s'affiche à l'écran.

• Cliquer sur **Oui** après avoir vérifié qu'il s'agit bien de la sauvegarde la plus récente.

Une fois les données patients récupérées, une nouvelle fenêtre apparait.

ΟΚ

