



Vivid T8

Tips & Tricks

Comment configurer l'export pdf vers un dossier partagé

Vivid™ T8 versions R1 à R2.5



Comment configurer l'export pdf vers un dossier partagé

Vivid™ T8 versions R1 à R2.5

Mai 2021

DOC2574596

ACCÉDER AU MENU DE CONFIGURATION	3
VÉRIFICATION DE L'ADRESSE IP	4
DÉCLARATION DU RÉPERTOIRE DISTANT	7
EXPORTATION DU RAPPORT	8

Le Vivid T9 / Vivid T8 est un système d'échographie à usage général, spécialement conçu pour une utilisation en imagerie cardiaque par un médecin qualifié et formé à l'évaluation échographique. Le Vivid T9 / Vivid T8 est destiné à être utilisé dans un environnement hospitalier, y compris un laboratoire d'écho, d'autres services hospitaliers, une salle d'opération, un laboratoire de cathétérisme et dans des cabinets médicaux privés pour les applications cliniques suivantes: fœtale / obstétrique, abdominale (comprend GYN, urologie), pédiatrique, petit organe (comprend sein, testicules, thyroïde), céphalique néonatale, céphalique adulte, cardiaque (comprend adulte et pédiatrique), Appareil musculosquelettique conventionnel, musculosquelettique superficiel, transcrânien, transoesophagien, transrectal, transvaginal, guidage interventionnel (y compris biopsie, drainage des fluides), peropératoire (vasculaire). Les modes de fonctionnement sont les suivants : B, M, PW Doppler, CW Doppler, Doppler couleur, Couleur M, Power Doppler, Imagerie harmonique, Impulsion codée et Modes combinés: B / M, B / PWD, B / Couleur / PWD, B / Puissance / PWD. Classe/Organisme notifié : IIa/ CE 0197. Fabricant : GE Medical Systems (China) Co., Ltd. Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation complet avant utilisation et lisez attentivement toutes les instructions pour assurer la bonne utilisation de votre dispositif médical. Dernière révision : 15-Octobre-2018




Accéder au menu de configuration

La configuration de la Gestion du Disque et la Sauvegarde de la base de données patients ne peuvent être effectuées que par un utilisateur disposant des droits d'administration.



Sur l'écran tactile, cliquer sur

● **Utilitaire**

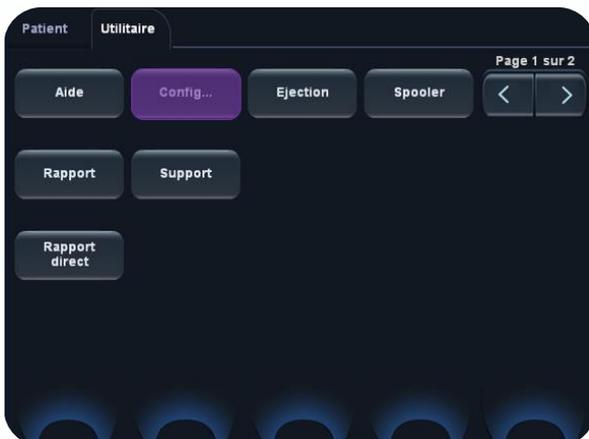


● **Config**

Sur l'écran principal sélectionner alors :


● **Réseau**

● **Gestion du Disque**

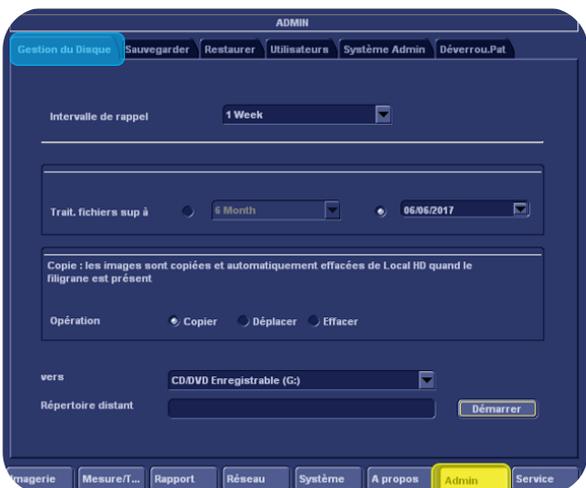

Vérification de l'adresse IP


Sur l'écran principal :

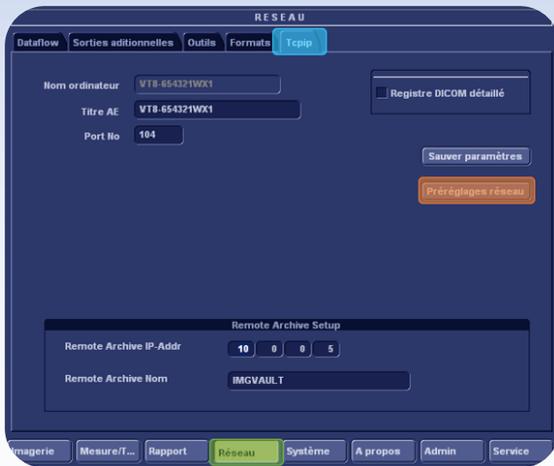


● Réseau

● Tcpiip


● Préréglages réseau

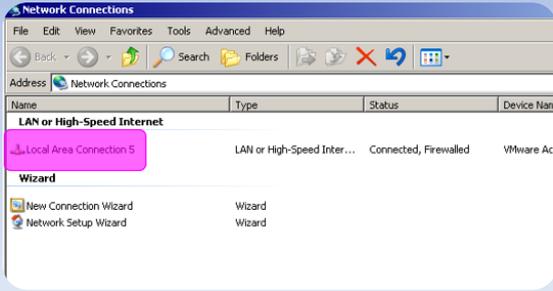

● Double clic sur la carte réseau

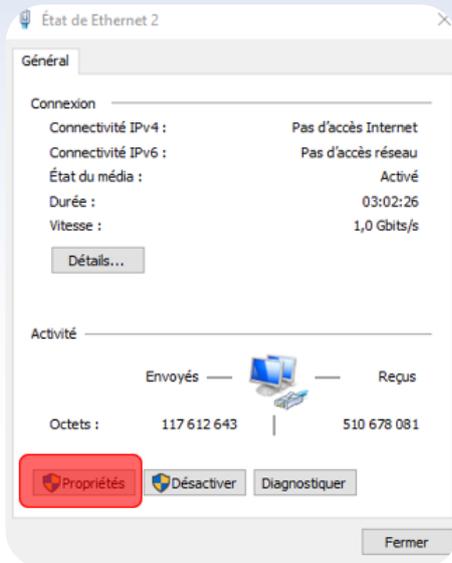

● Propriétés

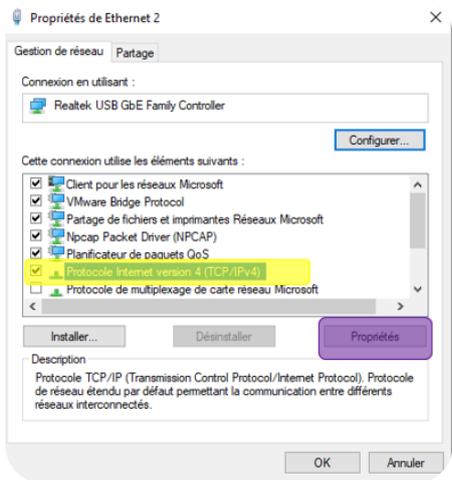

● Protocole Internet version 4


● Propriétés






● S'assurer que l'adresse IP est bien compatible avec l'ordinateur qui va héberger le dossier partagé

● OK

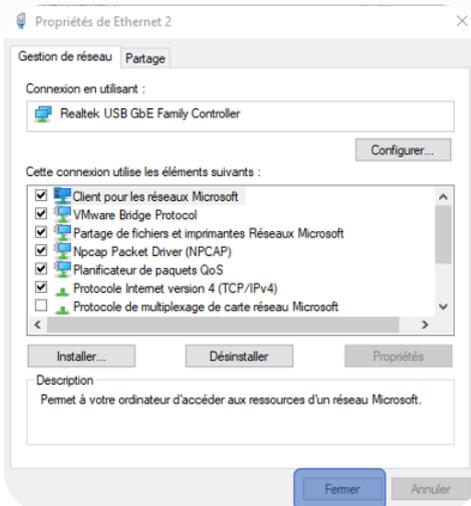



● Fermer

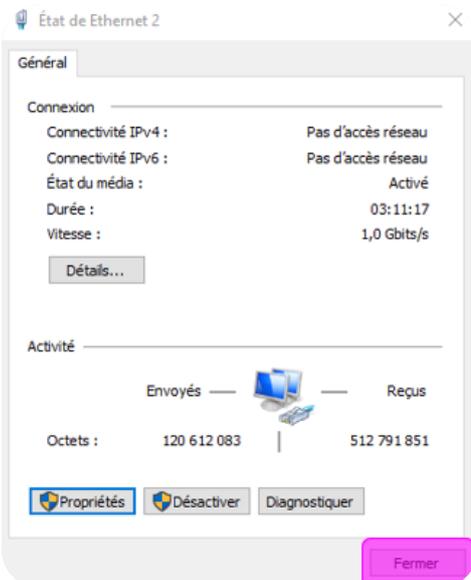

● Fermer



Déclaration du répertoire distant

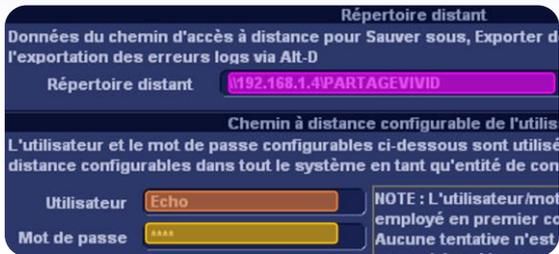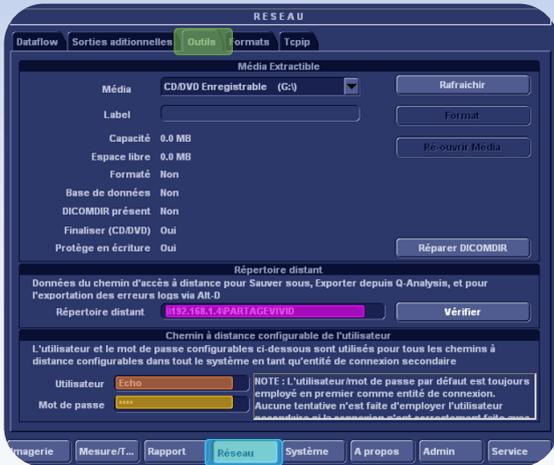

● Réseau

● Outils

● **Répertoire distant** : Renseigner le chemin du dossier partagé en respectant la nomenclature : [\\adresseIP\Nom](#)

● **Utilisateur** : Identifiant utilisé sur le PC pour le partage du dossier (exemple : **Echo**)

● **Mot de passe** : Mot de passe associé à cet identifiant



Exportation du rapport

Une fois le rapport disponible à l'écran, cliquer sur



● **Sauver comme**

● **Sauver dans archive** : sélectionner le répertoire partagé

● **Nom du fichier** : un nom automatique est donné. Il peut être modifié

● **Sauver en Type** : choisir le format **pdf**

● **Sauver**

